

Návod na vložení výměnného nanofiltru YourFILTER do masky YourPOCKET

1. Z archu papíru A4 vystříhnete obdélník 18×16 cm a přeložte jej na rozměr 18×8 cm. Dále pracujte ideálně ve sterilních ochranných rukavicích, nebo použijte dezinfekci na bázi alkoholu nebo si umyjte ruce mýdlem a vodou.
2. Do vzniklé papírové slohy vložte YourFILTER o velikosti 18×9 cm.
3. Bude tedy o 1 cm vyčnívat ze slohy.
4. Slohu uchopte v místě, kde je papír přeložený a stranou, kterou vyčnívá YourFILTER vložte celou slohu do masky YourPOCKET.
5. Přes masku YourPOCKET přidržte YourFILTER v místě přechínajícím z papírové slohy a slohu již bez YourFILTER vytáhněte ven. Slohu můžete použít při další výměně. YourFILTER je vložen a YourPOCKET připravena k použití.

